

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO

Dirección o Departamento: Laboratorio e imágenes

Fecha 30 marzo 2026

Tema actividad:

01.06 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) Evidencia T1 de ejecución del plan de mantenimiento

Cuerpo

Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2026, se llevaron a cabo varios mantenimientos preventivos tanto en el área de emergencia, odontología y a equipos de laboratorio, los cuales fueron ejecutados entre los meses enero- marzo de 2026, conforme a la programación establecida.

1. Equipo: FUJIFILM NX-600

Se realizó mantenimiento general que incluyó:

- Verificación completa del equipo
- Revisión de partes internas
- Limpieza interna y externa
- Lubricación de componentes
- Limpieza de porta objetos, incubador, cristal de fibra y filtros
- Verificación del funcionamiento de abanicos
- Reemplazo de lámpara
- Pruebas generales de funcionamiento

2. Equipo: I-CHROMA II

Se ejecutaron las siguientes actividades:

- Limpieza interna y externa
- Revisión y limpieza de la unidad óptica
- Limpieza del lector de tarjetas (card reader)
- Lubricación de rieles
- Pruebas de funcionamiento

3. Equipo: MEDONIC M-SERIES

El servicio realizado incluyó:

- Limpieza interna y externa
- Limpieza de cámaras WBC/RBC
- Reemplazo de tuberías entre válvulas
- Limpieza de cánula y líneas de aspiración
- Corrida de controles y pruebas con pacientes

4. Peso Portátil de emergencia Fit Scan. Lot. No: 8200610

Se realizó mantenimiento correctivo al equipo, consistente en el reemplazo de las pilas, debido a que las existentes se encontraban descargadas y no permitían el funcionamiento adecuado.

Una vez efectuado el cambio de baterías, el equipo quedó operando correctamente.

5. Área de Odontología.

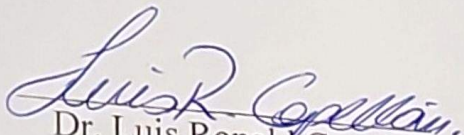
A partir del levantamiento en el área de odontología, se identificaron necesidades prioritarias, entre ellas: la falta de recipientes adecuados para el almacenamiento de materiales, la necesidad de incorporar lámparas de resina de mejor calidad para optimizar los procedimientos clínicos, el deterioro de la ventana del departamento, la cual carecía de dos hojas, y la ausencia de cortina en el área, situación que afectaba la higiene, privacidad y las condiciones del entorno.

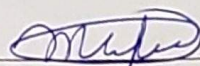
Estas necesidades fueron analizadas durante la reunión semanal con el equipo directivo, donde se acordó implementar un plan de mejora progresivo, orientado a acondicionar el área de manera gradual hasta alcanzar condiciones óptimas de funcionamiento.

Como parte de las acciones ejecutadas, se llevó a cabo la reparación de la ventana del departamento, completando las hojas faltantes, así como la instalación de una cortina, lo que permitió mejorar significativamente la privacidad y el ambiente del área. De igual forma, se iniciaron las gestiones correspondientes para la adquisición de los recipientes de almacenamiento y las lámparas de resina, mediante procesos de solicitud y cotización, en seguimiento al plan establecido hasta que el departamento de compras nos dio asistencia para poder obtenerlos.

Todos los equipos quedaron operativos tras la ejecución de los mantenimientos preventivos.

Nota: Tomar en cuenta que actualmente por motivo de remozamiento en fase total hay áreas que se encuentran inhabilitada como son: Cirugía, cocina y Rayos X,


Dr. Luis Ronald Capellán
Director HMLAM


Miurca Jiménez
Analista de Calidad HMLAM



Informaciones Generales

Nombre del establecimiento de salud: <i>Hospital Municipal Licy al medio</i>		Fecha: <i>11/3/26</i>
Regional de salud: <i>SRS I CIBAO Norte</i>		Provincia: <i>Santiago</i>
Nombre del responsable: <i>Lio. Ulaye</i>		Área perteneciente: <i>Especiales</i>

Informaciones del Equipo

Nombre del equipo: <i>I-chroma</i>	Tipo o modelo: <i>II</i>
Nombre del fabricante: <i>Biolitech</i>	Núm. de serial: <i>IR 25 D082000</i>
Historial de mantenimiento del equipo: ☐ Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado	

Detalles del mantenimiento:

Mantenimiento Preventivo
limpieza externa e interna
limpieza y revisión unidad óptica, card reader
lubricación del
Pruebas funcionamiento

Observaciones:

Proximo mantenimiento Preventivo 09/2026



Firma del responsable

Informaciones Generales

Nombre del establecimiento de salud: <i>Hosp. Municipal Licy al medio</i>		Fecha: <i>11/3/26</i>
Regional de salud: <i>SRS-1 Cibao Norte</i>	Provincia:	
Nombre del responsable: <i>Dr. Cefu</i>	Área perteneciente: <i>Hematología</i>	

Informaciones del Equipo

Nombre del equipo: <i>Medonic</i>	Tipo o modelo: <i>U Series 432 H</i>
Nombre del fabricante: <i>Boule</i>	Núm. de serial: <i>104014</i>
Historial de mantenimiento del equipo: ☐ Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado	

Detalles del mantenimiento:

Mantenimiento Preventivo
limpieza interna y externa
limpieza cámara glóbulos blancos y rojos
Reemplazo tuberías entre válvulas
limpieza cánula de aspiración y tuberías de aspiración
correida de fondo, lentes y peltos

Observaciones:

Próximo Mantenimiento 9/2026


Dr. Cefu
Firma del responsable



SRS **CIBAO NORTE**
SERVICIO REGIONAL DE SALUD



HOSPITAL
MUNICIPAL
LICEY AL MEDIO

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

Informaciones Generales

Nombre del establecimiento de salud: <i>Hosp. Licey al Medio</i>	Fecha: <i>11/3/26</i>
Regional de salud: <i>SRSI, CIBAO NORTE</i>	Provincia: <i>Santiago</i>
Nombre del responsable: <i>Dr. Lepi</i>	Área perteneciente: <i>Química</i>

Informaciones del Equipo

Nombre del equipo: <i>Fujifilm</i>	Tipo o modelo: <i>PX600</i>
Nombre del fabricante: <i>Fujifilm</i>	Núm. de serial: <i>16922033</i>
Historial de mantenimiento del equipo:	☐ Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado

Detalles del mantenimiento:

Mantenimiento Preventivo
Revisión partes
Limpieza interna y externa, incubador, cristal fibra
lubricación, limpieza portaobjetos
Reemplazo lámpara
funcionamiento abanicos

Observaciones:

Proximo mantenimiento 9/2026







This device complies with Part 15 of the FCC Rules and also with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOT LEGAL FOR TRADE
NON LÉGAL POUR LE COMMERCE
Lot No. 8 200610
TAQOITA Corporation
PORTO, JAPAN
CE
FCC ID: A60001-100

For questions or help, please contact
Call Customer Service: 1-800-4-A-SONY
U.S.A. website: www.sony.com















